

睡眠健康グッズ

新製品

バルケーワイヤレス

HumanCharger®



- コンパクトでスタイリッシュなネックバンド方式
- 心と体に心地よい、光とサウンドのメンタルケア
- ワイヤレスでも音の劣化が気にならないBluetooth搭載
- ラクラク簡単操作！

おこやが
MEDICAL

バルケーワイヤレス

HumanCharger®


バルケーワイヤレスは、いつでもどこでも手軽に、耳から脳に光を照射します。脳には毎日、適正量の光が必要とされています。本機器によって効率的に光を浴びることができます。特に強いストレスを受けることが多い現代人にとって、心と身体の調子を整えて、気分と睡眠の質の向上をサポートします。



使い方


1 充電

ご使用前にフル充電されることをお勧めします。本体にUSBケーブルを接続して、1時間程度で充電は完了します。

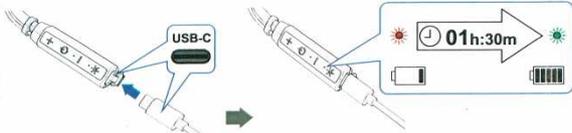


2 コネクティング

電源ボタンを長押し（5秒程度）すると、インジケーターは赤色と青色が交互に点滅し始めます。スマホのBluetooth設定をONにすると、AndroidまたはiPhoneの選択画面になりますので、どちらかを選択します。自動的にHumanCharger設定となります。

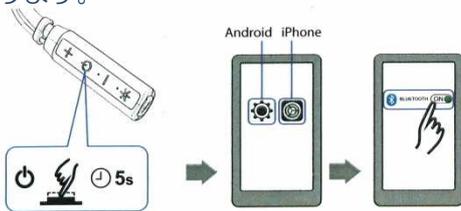


3 オーディオ操作

音量調整や基本操作（再生や頭出し）は本機器の操作部で行います。

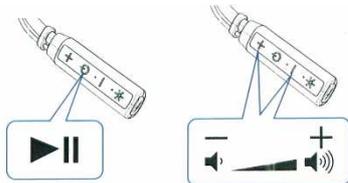

4 光照射

電源ボタンをONにし、点灯ボタンを押すと、12分間点灯します。

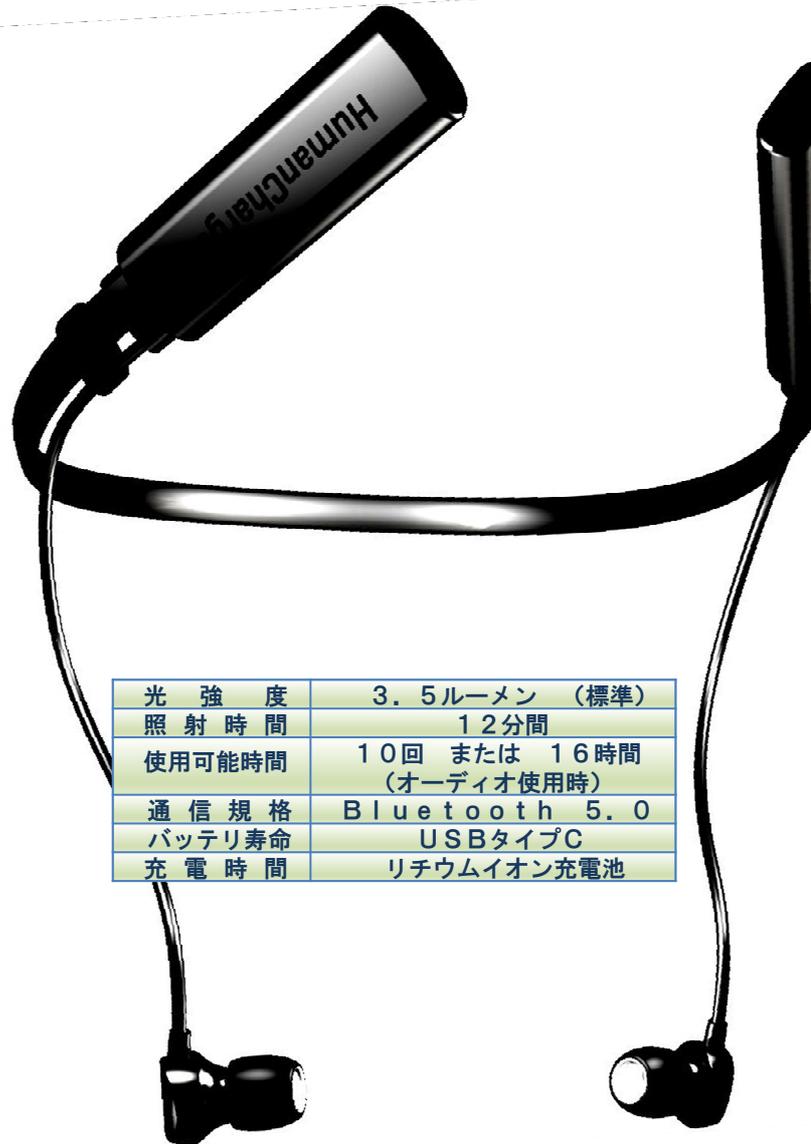

光強度	3.5ルーメン（標準）
照射時間	12分間
使用可能時間	10回 または 16時間 （オーディオ使用時）
通信規格	Bluetooth 5.0
バッテリー寿命	USBタイプC
充電時間	リチウムイオン充電電池

お問い合わせ・ご注文は：

すこやかメディカル株式会社

〒604-8211

京都市中京区玉蔵町 121 番地 美濃利ビル303

電話：075-252-2101 Fax:075-252-2102

販売店：

URL: <https://sukoyaka-med.co.jp>